

マイサイン02

スタートアップマニュアル

マイサイン02の使用準備

左図のように、マイサイン02本体⑤にセンサーケーブル①を接続し、センサーケーブルのPhone ジャック側に、酸素センサ②を接続、酸素センサにフロー分割器③、Tアダプタ④を接続します。





マイサインO2の充電

付属の充電用ACアダプタおよびUSBケーブルを用いてマイサインO2のUSBポートより、本体内部のリチウムイオンバッテリーを充電してください。フル充電には約5時間かかります。

 **ご注意**：充電には充電用ACアダプタをご使用ください。

電源ON/OFF

電源ONには  ボタンを1秒以上押ししてください。

電源OFFには  ボタンを3秒以上、画面表示のカウントダウンに従って押ししてください。



電源ボタン

酸素濃度キャリブレーション

キャリブレーションを行う場合は、電源投入後、測定画面で Calibration をボタン選択すると左の画面表示になります。

100% 酸素使用の場合は、左の  (100%と表示している側のボタン) を押し、キャリブレーションを行います。

室内気 (酸素 21%) の場合は、右の  (21%と表示している側のボタン) を押し、キャリブレーションを行います。



警報設定

測定酸素濃度の警報を発生させる上限値、下限値を自動で、あるいは手動で設定することができます。電源投入後の測定画面で Alarm Limits を選択した後、



 AutoSet を押すと、

現在の測定値の+3%を上限値

現在の測定値の-3%を下限値 で設定されます。

 Manual →   →  のボタン操作で警報の上限値、下限値を手動で設定することができます。

警報消音：  ボタンを1回押すと120秒間警報音を消

音します。警報発生中に  ボタンを2回押すと警報消音し続けます。