



## 新素材チューブ(Lシリーズ)の特長

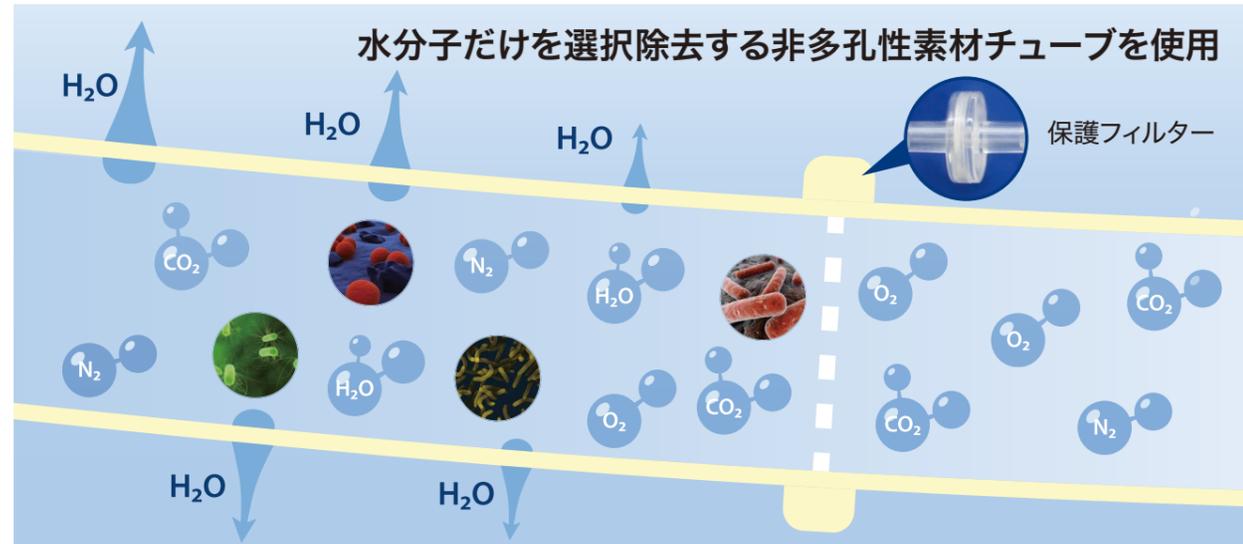


BPカプノカニューラのLシリーズはサンプリングチューブとして水分を透過して大気に排出する新開発の非多孔性素材を使用しています。従来から同じ目的に使用されているNafion®に比べて、安価でチューブ全部に使用しておりほぼ完全に水分を除去できます。従って水分除去用のウォータートラップを挿入する必要がなく、機器の汚染を防ぐために死腔負担の少ない保護フィルタのみが付加されています。従って、サンプリングガス系の死腔は最小限で、新生児や小児の速く小さい呼吸に対しても充分な分解能が確保されて、歪の少ない真値に近いCO<sub>2</sub>波形で正確なEtCO<sub>2</sub>値が得られることとなります。

### 安定したEtCO<sub>2</sub>の連続モニタリングを実現

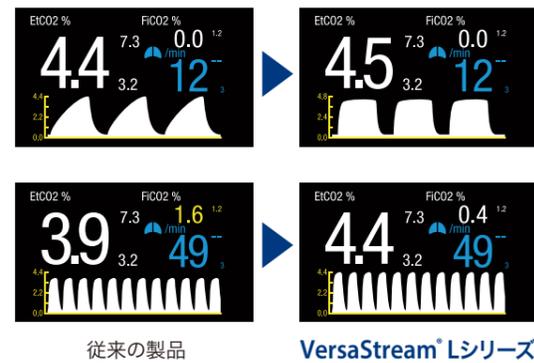

VersaStream® Sシリーズ: 低価格でスポット使用などに適したSシリーズ(24時間用)もございます。詳細はお問合せ下さい。

### 製品サイズ

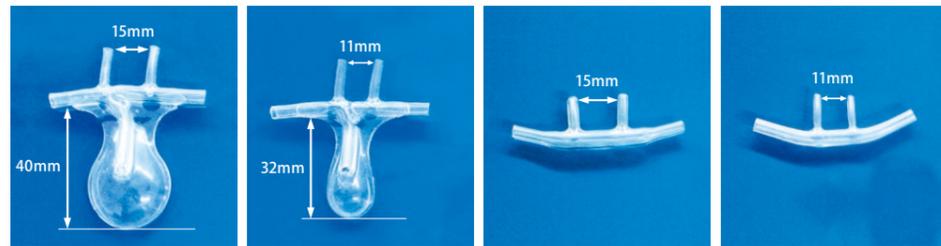

成人口鼻カニューラ 小児口鼻カニューラ 成人鼻カニューラ 小児鼻カニューラ

※予告なく改良のため仕様変更することがございます。※添付文書に従い使用してください。※このカタログは2017年7月現在のものです。

製造業者 bluepoint MEDICAL GmbH&Co.KG  
ブルーポイント メディカル有限公司 (ドイツ連邦共和国)

製造販売業者 **アイビジョン 株式会社**

〒113-0034 東京都文京区湯島3-1-7 妻恋木工第二ビル  
Tel.03-3834-2025 Fax.03-3834-2026  
E-mail:sales@aivision.co.jp

### 【お問い合わせ先】

販売業者 **KYOTO MEDICAL PLANNING**

株式会社 京都医療設計ジャパンメディカル事業部  
〒607-8035 京都市山科区四ノ宮神田町4番地 古橋山科ビル  
TEL.(075)582-9580 FAX.(075)582-9581  
http://www.kyoto-mp.co.jp/

bluepoint MEDICAL


高性能CO<sub>2</sub>ガスサンプリングライン

CapnoTrue ASP 専用

# バルサストリーム



## VersaStream® Sampling Lines

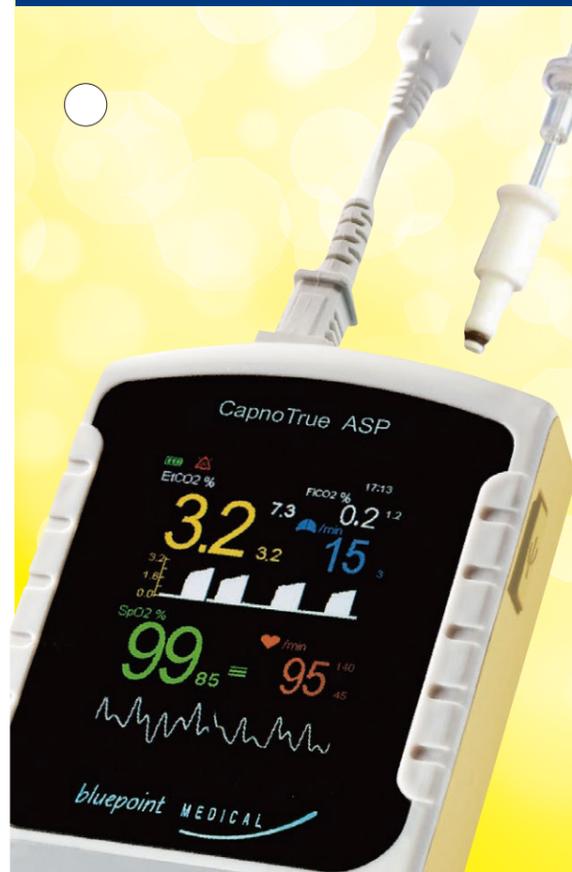

**LATEX-FREE**

ラテックス素材を使用しておりません

**DEHP-FREE**

DEHP可塑剤を使用しておりません

**Aivision Corporation**

# CapnoTrue ASP 対応製品 ラインナップ

CO<sub>2</sub>サンプリングライン (チューブ長:200cm)


1箱25本入



## ◆ 鼻カニューラル (成人/小児/幼児)

使用時間: 72時間

新素材チューブ使用

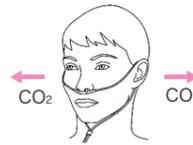

品名	患者体重	型番	JANコード
成人鼻カニューラル	≥20kg	7090121008	4582235341401
小児鼻カニューラル	≥10kg	7090121009	4582235341418


販売名:BPカブノカニューラル 届出番号:13B1X00143000337



## ◆ 口鼻カニューラル (成人/小児)

使用時間: 72時間

新素材チューブ使用

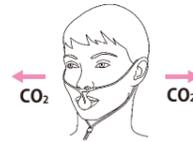

品名	患者体重	型番	JANコード
成人口鼻カニューラル	≥20kg	7090121018	4582235341456
小児口鼻カニューラル	≥10kg	7090121019	4582235341463

販売名:BPカブノカニューラル 届出番号:13B1X00143000337




## ◆ カプラインL

※「成人小児気道アダプタ」は別売りです。  
型番: 3090121002

使用時間: 72時間

新素材チューブ使用

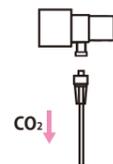

品名	患者体重	型番	JANコード
カプラインL	—	7090121130	4582235341524

販売名:BPカプライン(片側ルアーロック) 届出番号:13B1X00143000342


# VersaStream® Sampling Lines



## ◆ 気道アダプタL (成人/幼児)

使用時間: 72時間

新素材チューブ使用

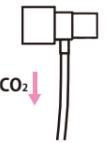

品名	死腔	患者体重	型番	JANコード
成人気道アダプタL	6.6ml	≥10kg	7090121024	4582235341494
幼児気道アダプタL	1ml	<10kg	7090121025	4582235341500

販売名:BPカブノ気道アダプタL 届出番号:13B1X00143000341

O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>サンプリングライン (チューブ長:200cm)


1箱10本入



## ◆ 鼻カニューラルLOX (成人/小児/ )


使用時間: 72時間

新素材チューブ使用

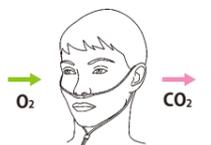

品名	患者体重	型番	JANコード
成人鼻カニューラルLOX	≥20kg	7090121011	4582235341821
小児鼻カニューラルLOX	≥10kg	7090121012	4582235341838


販売名:VersaStream カブノカニューラル (O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> サンプリングライン) 認証番号:229AGBZX00013000

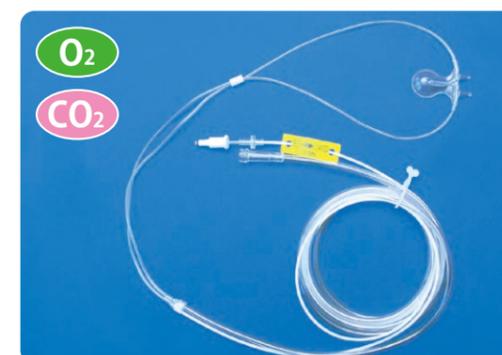

## ◆ 口鼻カニューラルLOX (成人/小児)

使用時間: 72時間

新素材チューブ使用

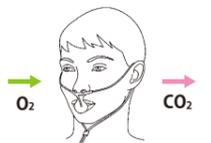

品名	患者体重	型番	JANコード
成人口鼻カニューラルLOX	≥20kg	7090121020	4582235341852
小児口鼻カニューラルLOX	≥10kg	7090121021	4582235341869

販売名:VersaStream カブノカニューラル (O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub> サンプリングライン) 認証番号:229AGBZX00013000

## O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>サンプリングラインのガスの流れについて

O<sub>2</sub>/CO<sub>2</sub>サンプリングラインは、使用者の右側から酸素を供給し、左側よりCO<sub>2</sub>サンプリングを行います。

